

類別:機械器具 55

一般的名称:手動式生体用洗浄器

販売名:電気保温洗浄器


【警告】

- ・清拭・消毒をしないと感染の原因になることがあるので
機器の洗浄、消毒を十分行うこと。
- ・やけどを避けるため、タンク内の液体を使用する前に必ず
液温を確認すること。

【禁忌・禁止】

- ・機器の改造。
- ・不具合(異常)状態での使用。
- ・未整備状態(定期点検や日常点検をしてない状態)での使用。

【形状・構造等】

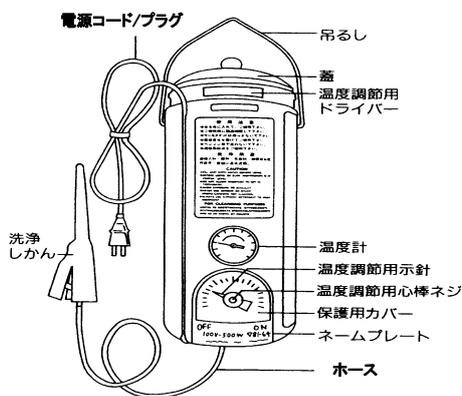

- ・本体寸法 直径155mm 高さ415mm
- ・製品総重量 1600g
- ・定格電源入力 AC100V 500W 50/60Hz

【性能】

- ・ヒーター AC100V 500W
- ・昇温時間(38度設定)
18分以内(5L液温10°C標準温度設定時)
- ・タンク容量 5L

【使用目的】

産婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科などにおける
衛生洗浄、治療、または排便後、痔、生理時等の
各洗浄や宿便、便秘の温水洗腸などの使用を目的
としたものである。


【使用方法】

1. 必ず容器内に3L以上水、又は薬液を先に入れること。
2. 本体容器を高さ1.2m～2mの位置に固定し、必ず容器を
水平状態に設置すること。
3. それから電源プラグを入れること。
4. 温度調節用示針を38°C前後の位置に設定すること。
5. 加温後、温度計の示す温度と設定温度が合っているか
確認すること。
6. 使用直前に容器内の保温液を手で触れて適温を確認してください。
その際、洗浄しかんのホースに残留している液体(200cc程)を
充分に出し切って確認すること。

【使用上の注意】

1. 水分(薬液)などを容器内に入れる際、本体の外側
(特に温度調節部)は水や薬液で濡らさないこと。
・濡れた場合は速やかに使用を中止し乾燥させること。
2. 本体容器内に65°C以上の熱湯(薬液)を入れないこと。
・容器本体を65°C以上の環境に入れると安全回路の
温度ヒューズが切れて使用不能となるため。(要修理)
3. お湯を使うときは、やけどに注意し、使用すること。
・温度計の示す温度と洗浄しかんから出る薬液が異なる
ことがありますので、薬液に手で触れること。
4. 金属腐食性の強い消毒液(ポピドンヨード〈イソジン液〉、
次亜塩素酸ナトリウム)などは絶対に使用しないこと。
・本体の金属部分の動作機能に支障をきたすため。
5. 空焚きをしないこと。
・本体の温水を捨てる時は、先に電源を切ること。

【動作原理】

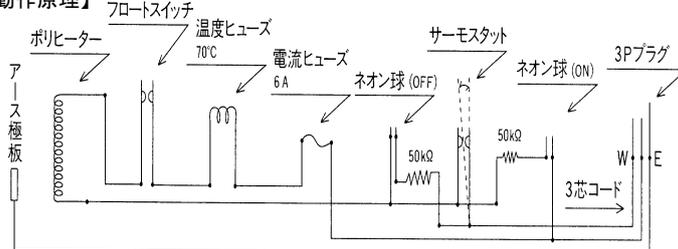

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間】

1. 保管環境 温度…… -10℃～50℃
湿度…… 30%～80% (結露していないこと)
2. 保管場所については次の事項に注意してください。
 - ・水のかからない場所に保管すること。
 - ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などによる悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
 - ・傾斜、振動、衝撃(移動運搬時を含む)などにおいて安定状態に注意すること。
3. 耐用年数……7年
(尚、洗浄しかん、ホースに関しては消耗品として扱うこと。)

【取扱上の注意】

1. 毎日使用後は、水又は薬液を完全に排水し、本体容器、洗浄しかんなどの清拭・消毒を行うこと。
 - ・ガス滅菌を使用する場合は65℃以下で行うこと。
 - ・オートクレーブは使用不可。
2. 故障した場合は、勝手にいじらず「故障中」などの適切な表示を行い、修理は専門家に任せること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

有限会社 ダイヤモンド電気

住所：東京都新宿区高田馬場 4-32-6

電話：03-5331-3351 FAX：03-5331-5330

製造業者の氏名：

有限会社 ダイヤモンド電気

住所：東京都新宿区高田馬場 4-32-6

取扱説明書を必ずご参照下さい。

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄器キット 11297001
販売名: 洗浄嘴管
Aタイプ, Bタイプ

【警告】

〈使用方法〉


- ・清拭・消毒をしないと感染の原因になることがあるので器具の洗浄・消毒を十分行うこと。

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

- ・本品は手動式生体用洗浄器に用いるためのパッケージ品であり、使用目的以外は使用しないこと。
〔誤動作や故障の原因となる。〕

【形状・構造及び原理等】

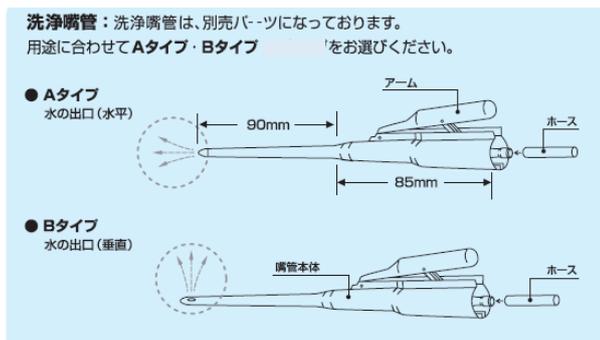

- ・材質 ポリエチレン
- ・本体寸法 全長175mm 先端径 8.5φ
- ・最大吐出量 1L/分

手動式生体用洗浄器と本品をシリコンホースもしくは塩ビ系ホースで接続し、落差式にて流れてきた洗浄液を、本品のアーム部を握ることにより液体(薬液)の流量を開閉することが可能。目的部位に噴出することができる。噴射方向はAタイプBタイプ(左記図水の出口)方向に噴出することができる。

【使用目的又は効果】

本品は、手動式生体用洗浄器と組合せて、容器から流出する洗浄液を処置部位に衛生洗浄、又は治療に使用することを目的としたパッケージ品である。

【使用方法等】

1. 使用前は十分洗浄・消毒を行い使用すること。
2. 洗浄嘴管先端部分に傷、バリ、変形がないことを確認すること。
3. 本品と同時に使用する電気保温洗浄器の取扱説明書に従って、ホース、5L容器と接続すること。
4. 電気保温洗浄器の取扱説明書的使用方法に従って、衛生洗浄、又は治療に使用すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 本品は非滅菌品であり、菌の発生を防ぐ為使用前・使用後は必ず清拭・消毒を行うこと。
・ガス滅菌を行う場合は65℃以下で使用すること。
・オートクレーブは不可。
・ベンジンやキシロールなどで清拭禁止
2. 接続口にホースを接続するときは、本体とアーム部分を握り接続口に接続すること。
〔握らず接続すると中のOリングが外れる場合がある。〕
3. 故障した場合は、勝手にいじらず「故障中」などの適切な表示を行い、修理は専門家に任せること。
4. 本品は消耗品として扱い、劣化や変色した場合は速やかに交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

有限会社 ダイヤモンド電気

住所：東京都新宿区高田馬場 4-32-6

グレイスハウス 3階

電話：03-5331-3351 FAX03-5331-5330

製造業者

有限会社 ダイヤモンド電気

住所：東京都新宿区高田馬場 4-32-6

グレイスハウス 3階

取扱説明書を必ずご参照下さい。

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄器キット 11297001

販売名: 洗浄嘴管

C タイプ

【警告】

〈使用方法〉

・清拭・消毒をしないと感染の原因になることがあるので
器具の洗浄・消毒を十分行うこと。


【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

・本品は手動式生体用洗浄器・大腸灌流装置に用いるための
パッケージ品であり、使用目的以外は使用しないこと。
〔誤動作や故障の原因となる。〕

【形状・構造及び原理等】

● Cタイプ

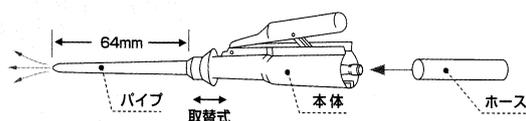

※ Cタイプは先端の(パイプ部分のみ)を取り替えます。

- ・材質 ポリエチレン・シリコン
- ・本体寸法 全長168mm 先端径 9φ
- ・最大吐出量 1L/分

手動式生体用洗浄器・大腸灌流装置と洗浄嘴管の接続口をシリコンホース
(もしくは塩ビ系ホース)で接続し、落差式にて流れてきた液体(薬液)など
を、洗浄嘴管のアーム部を握ることにより液体(薬液)の流量を開閉する
ことが可能。噴射方向は左記図水の出口方向に噴出することが可能。先端
のパイプ部分は取り外しが可能。

【使用目的又は効果】

本品は、手動式生体用洗浄器・大腸灌流装置と組合せて、容器から流
出する洗浄液を処置部位に衛生洗浄、治療、又は排便後の洗浄、痔、
生理時の各洗浄や宿便、便秘などの温水洗腸などに使用することを目
的とした、パッケージ品である。

【使用方法等】

1. 本品は非滅菌品である。使用前に十分洗浄・消毒を行い使用すること。
2. 洗浄嘴管先端部分に傷、バリ、変形がないことを確認すること。
3. 本品と同時に使用する電気保温洗浄器(手動式生体用洗浄器・大腸灌
流装置)の取扱説明書に従って、ホース、5L 容器と接続すること。
4. 電気保温洗浄器(手動式生体用洗浄器・大腸灌流装置)の取扱説明書
に従って処置部位へ、衛生洗浄、治療、又は温水洗腸に使用して
ください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 本品は非滅菌品であり、菌の発生を防ぐ為
使用前・使用後は必ず清拭・消毒を行うこと。
・ガス滅菌を行う場合は 65℃以下で使用すること。
・オートクレーブは不可。
・ベンジンやキシロールなどで清拭禁止
2. 接続口にホースを接続するときは、本体とアーム部分
を握り接続口に接続すること。
〔握らず接続すると中の Oリングが外れる場合がある。〕
3. 故障した場合は、勝手にいじらず「故障中」などの
適切な表示を行い、修理は専門家に任せること。
4. 本品は消耗品として扱い、劣化や変色した場合は
速やかに交換すること。
5. 先端のパイプ部分を接続するときは、水分を拭きとって接
続してください。水分があるままで接続すると外れやすくな
ります。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

有限会社 ダイヤモンド電気

住所 : 東京都新宿区高田馬場 4-32-6

電話 : 03-5331-3351 FAX03-5331-5330

製造業者

有限会社 ダイヤモンド電気

住所 : 東京都新宿区高田馬場 4-32-6

取扱説明書を必ずご参照下さい。